



Nottüröffner, Schraubenzieher oder ähnlicher Gegenstand wird für die Öffnung der Türe benötigt.



Nottüröffner seitlich rechts unterhalb vom Türgriff einschieben.



In diesem markierten Bereich muss der Nottüröffner eingeführt werden.



Mit dem Nottüröffner den Metallstift gegen das Gerät drücken.
Gleichzeitig die Türe öffnen.



Nach der Türöffnung die zwei Sicherungen unten rechts auswechseln, welche sich oberhalb vom Ein- und Ausschalter befinden. Die neuen Sicherungen sind auf der linken Innenseite der Türe.