

MELAprint 60 kalibrieren

Falls die Etiketten nicht mittig bedruckt bzw. Teile des Ausdrucks abgeschnitten werden, kann der LabelPrinter wie folgt kalibriert werden:

- 1. Schalten Sie den Label-Printer aus.**
- 2. Halten Sie den FEED-Button gedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Label-Printer ein.**
- 3. Drücken Sie den FEED-Button 3x kurz und 1x lang (ca. 1 Sek.), um in das Menü „Calibration“ zu gelangen.**
- 4. Drücken Sie den FEED-Button 2x kurz und 1x lang (ca. 1 Sek.), um das Untermenü „General Calibration“ auszuführen. Der Label-Printer druckt am Ende der Kalibrierung das „Calibration“-Menü aus.**
- 5. Schalten Sie den Label-Printer nochmals aus und wieder ein.**