

# EC 25

## ALGINAT- UND GIPSENTFERNER GEBRAUCHSFERTIGES WÄSSRIGES REINIGUNGSBAD

### Beschreibung

Gebrauchsfertiges Reinigungsbad. Gut geeignet zur gründlichen Ultraschall-Reinigung von:

- Abdrucklöffeln und zahnärztlichen Instrumenten,
- Instrumenten aus Edelstahl, Glas und Keramik,
- Kunststoffen.

Entfernt: Alginate, Dentalgipse.

Leichtmetall-Legierungen (Al, Mg, Zn) zuvor auf Beständigkeit prüfen. Anlaufgefahr bei schlecht vernickelten Materialien (z.B. alte Abdrucklöffel).

### Anwendung und Dosierung

**Alginate:** unverdünnt bei 60 – 70 °C ca. 15 – 45 min. im Ultraschallbad; Alginate lassen sich danach leicht von Abdrucklöffeln abheben.

**Dentalgipse:** bei 40 – 70 °C ca. 1 – 3 min. im Ultraschallbad.

Nach dem Reinigen gut unter fließendem Wasser abspülen und evtl. Reste abbürsten.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

EC 25 ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS] als gefährlich (augenreizend) eingestuft. Bitte beachten Sie auch dazu die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um.

### Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 1,098 g/ml, pH ~11,7 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: <5% anionische Tenside.

### Entsorgung des Reinigungsbades

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.

Das Reinigungsbad kann nach Gebrauch entsprechend den örtlichen pH-Grenzwerten in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zulässt.

Abfallschlüssel: 07 06 01\*, „wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen“.

Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

### Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1 Liter Flasche; 10 Liter und 25 Liter HDPE-Kanister.

Nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen +5 °C und +35 °C, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist kein Gefahrgut gemäß GGV für alle Transportarten.



**Elma Schmidbauer GmbH**

Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen

e-mail: [info@elma-ultrasonic.com](mailto:info@elma-ultrasonic.com)

13.07.2016 / Version 4.0 / E:\PRODUKTINFO\deutsch\word\_D\VP\_EC 25\_D.docx

Tel.: +49 7731 882-0

Fax: +49 7731 882-266

[www.elma-ultrasonic.com](http://www.elma-ultrasonic.com)